



ContourTM plus ONE[»]


Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Spárování inteligentního
glukometru **CONTOUR™**
PLUS ONE s aplikací
CONTOUR™ DIABETES



Contour™
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Spárujte svůj **glukometr CONTOUR™ PLUS ONE**, s aplikací **CONTOUR™ DIABETES**, aby byly synchronní, kdykoli je k dispozici připojení přes Bluetooth®.

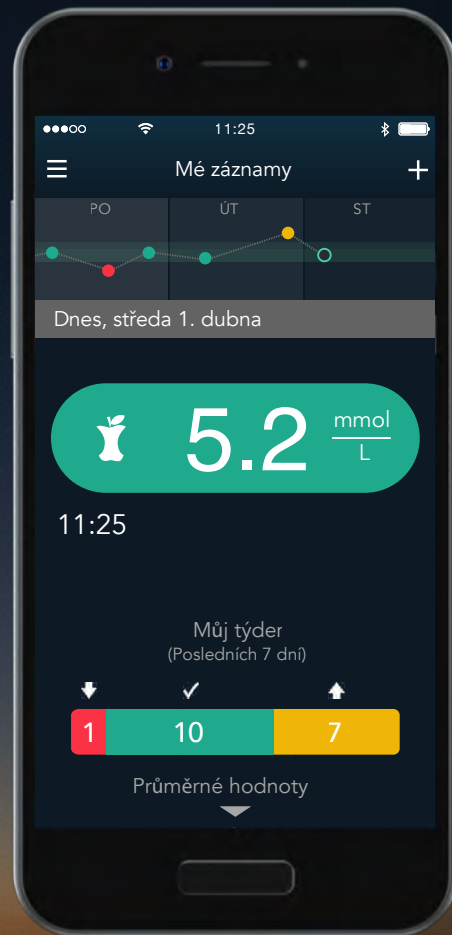


Contour™
plus ONE™
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

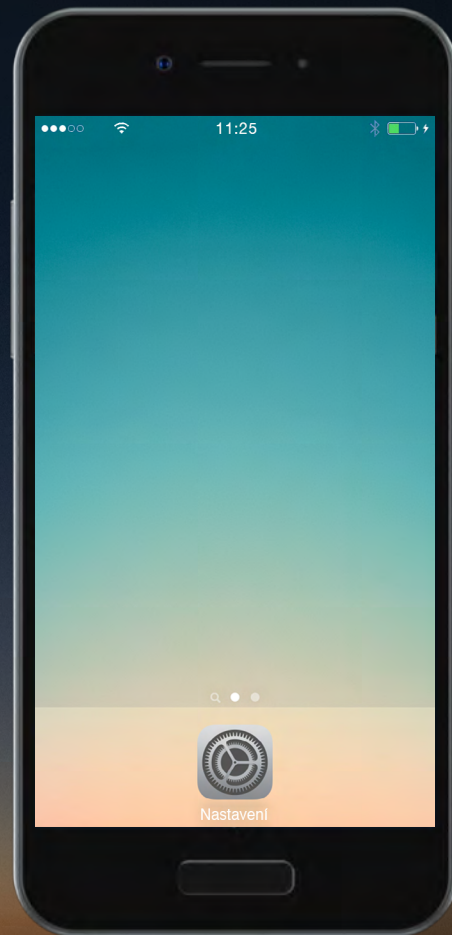


Contour™
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

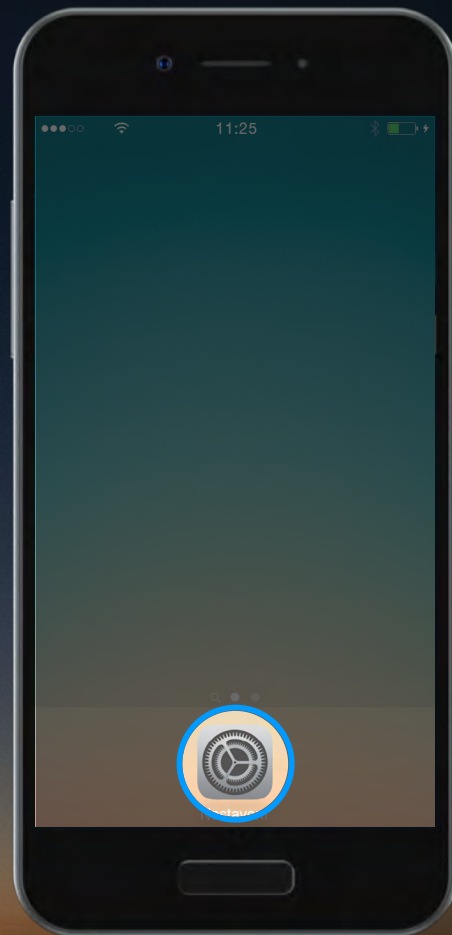


Contour™
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

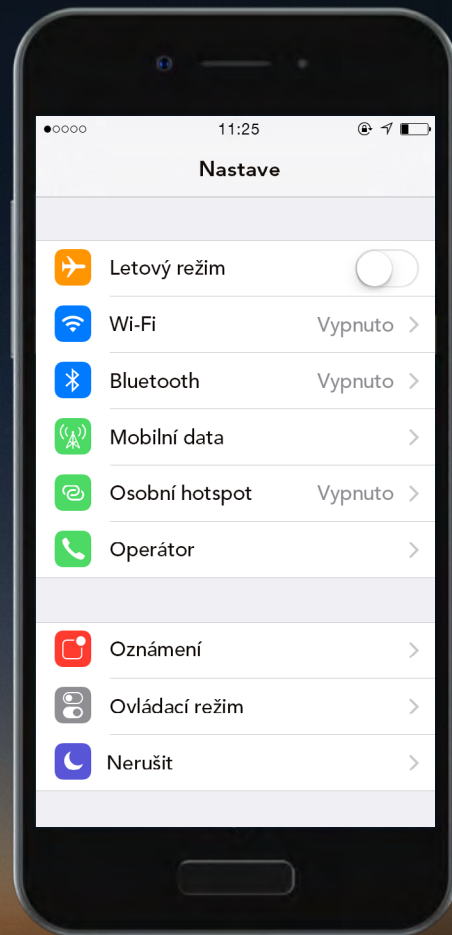


**Contour™
plus ONE»**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

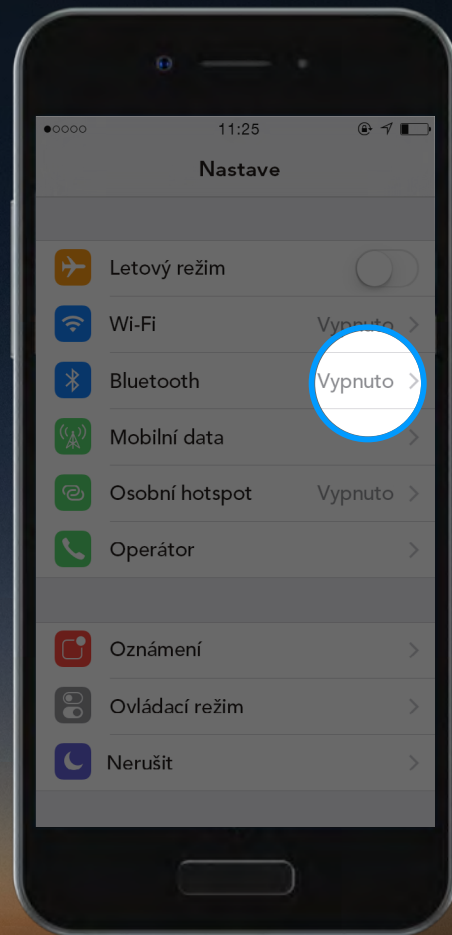


**Contour™
plus ONE»**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru
CONTOUR™ PLUS ONE zapněte
Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®**
a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

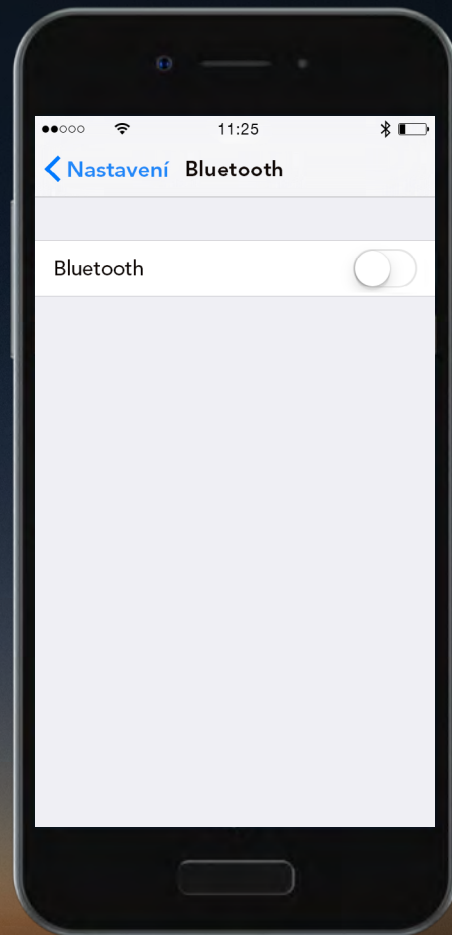


Contour™
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru
CONTOUR™ PLUS ONE zapněte
Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®**
a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

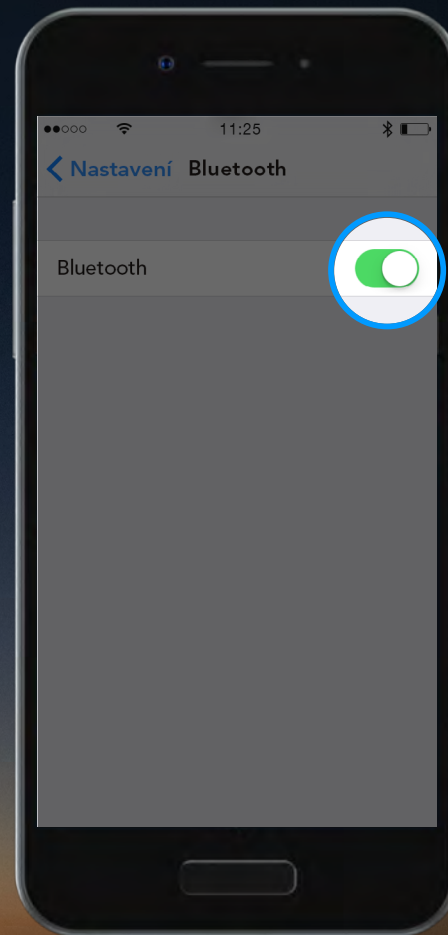

Contour™
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Spárování glukometru

V aplikaci **CONTOUR™ DIABETES** budete po nastavení účtu požádáni o spárování glukometru.

Vypněte glukometr a nechte jej v blízkosti mobilního zařízení.

Zvolte **Pokračovat**.



Contour™
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Spárování glukometru

V aplikaci **CONTOUR™ DIABETES** budete po nastavení účtu požádáni o spárování glukometru.

Vypněte glukometr a nechte jej v blízkosti mobilního zařízení.

Zvolte **Pokračovat**.




**Contour™
plus ONE»**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE**, dokud nevidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.

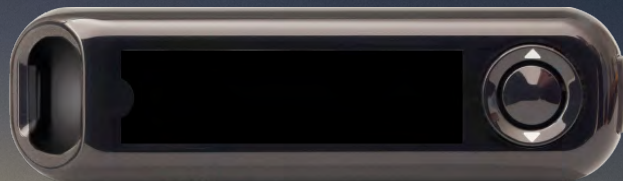

**Contour™
plus ONE»**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE**, dokud neuvidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.



Contour™
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE**, dokud neuvidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.



Contour™
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE**, dokud neuvidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.



Contour™
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4.

Spárování glukometru

Zadejte výrobní číslo svého glukometru.

Najdete jej na štítku na zadní straně glukometru.

Zvolte **Pokračovat**.



ContourTM
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru


4.

Spárování glukometru

Zadejte výrobní číslo svého glukometru.

Najdete jej na štítku na zadní straně glukometru.

Zvolte **Pokračovat**.

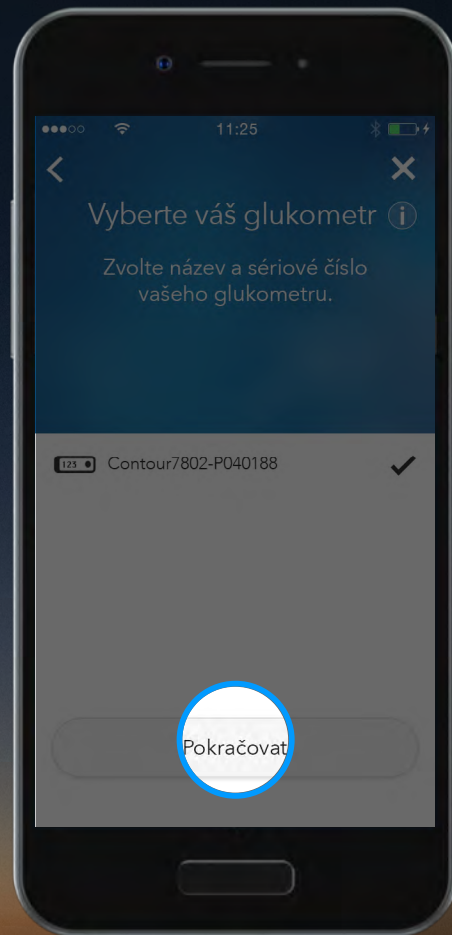


ContourTM
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5.

Spárování glukometru

Ke glukometru se nyní připojí aplikace
CONTOUR DIABETES.

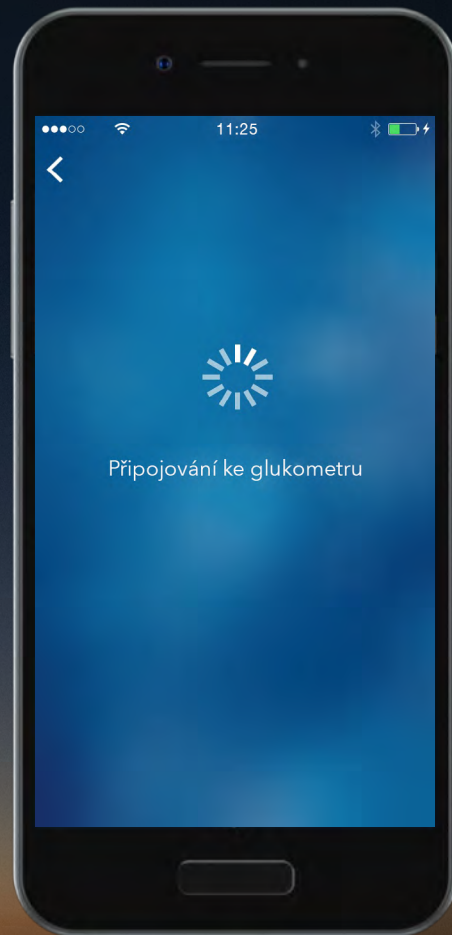


ContourTM
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6.

Spárování glukometru

Zvolte **Spárovat** pro potvrzení požadavku na spárování.

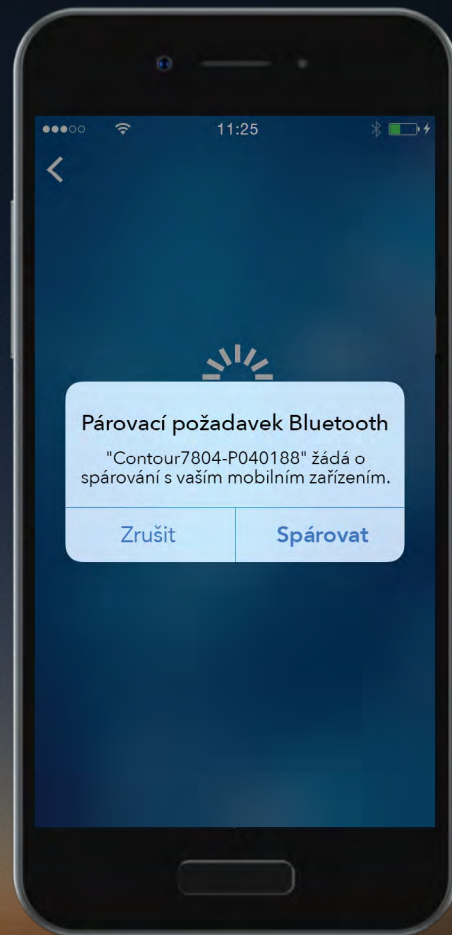


ContourTM
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6.

Spárování glukometru

Zvolte **Spárovat** pro potvrzení požadavku na spárování.

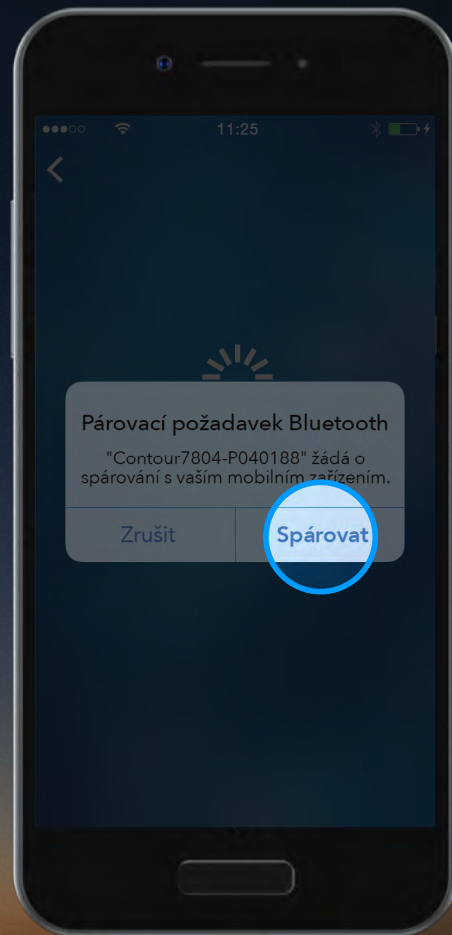


ContourTM
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6.

Spárování glukometru

Zvolte **Spárovat** pro potvrzení požadavku na spárování.

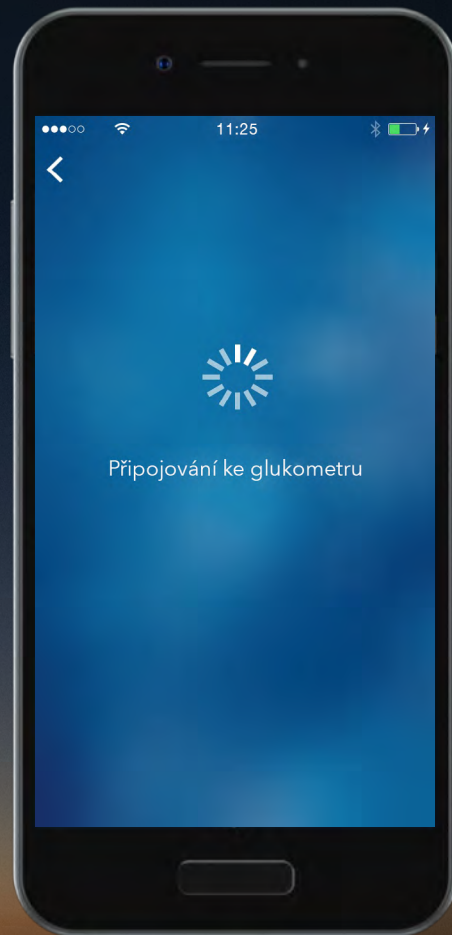

ContourTM
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

7.

Spárování glukometru

Jakmile je glukometr spárovaný, zvolte **Pokračovat**.

Nyní můžete provést nastavení aplikace **CONTOUR™ DIABETES**.



**Contour™
plus ONE»**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

7.

Spárování glukometru

Jakmile je glukometr spárovaný, zvolte **Pokračovat**.

Nyní můžete provést nastavení aplikace **CONTOUR™ DIABETES**.




Contour™
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Pokud máte dotazy ohledně glukometru **CONTOUR™ PLUS ONE** a aplikace **CONTOUR™ DIABETES**, promluvte si se zdravotnickým odborníkem a odkažte se na uživatelskou příručku. Pro více informací a zjištění, zda je glukometr **CONTOUR™ PLUS ONE** k dostání ve vaší zemi, navštivte diabetes.ascensia.com.



Získání aplikace

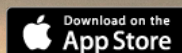

Apple a logo Apple jsou obchodními značkami společnosti Apple Inc. registrovanými v USA a dalších zemích. App Store je značka aplikace společnosti Apple Inc. Google Play je obchodní značka společnosti Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a CONTOUR jsou obchodní značky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Contour™
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

