



Contour[®] plus ONE[»]

Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Vytváření Plánů připomínání testu pomocí aplikace CONTOUR™DIABETES




Provedení jakýchkoliv změn léčby, diety nebo cvičení je vždy třeba konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče.



Contour
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru


Plány připomínání testu

vám pomohou optimalizovat testování, abyste získali takové výsledky, které vám poskytnou jasný přehled o krevní glukóze.

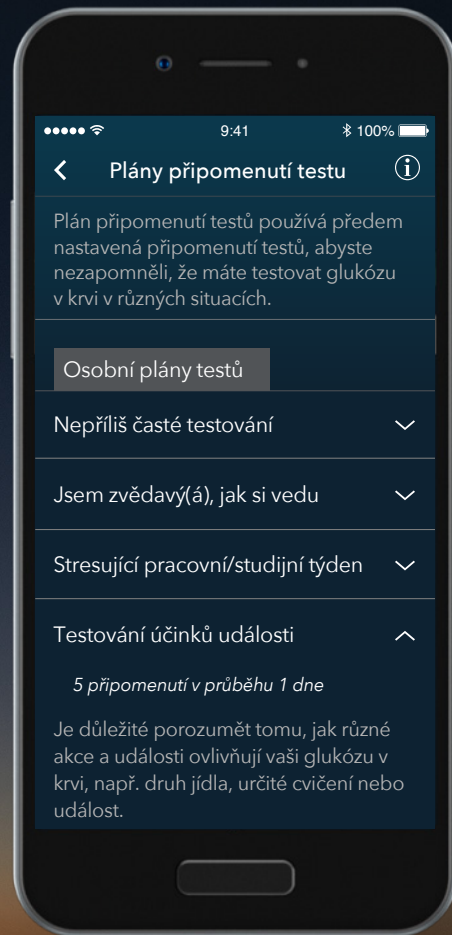


Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1. **Plán připomenutí testu**
Můžete vybrat z položky **Moje tendence** z **Hlavní nabídky** a poté poklepat na **+**.

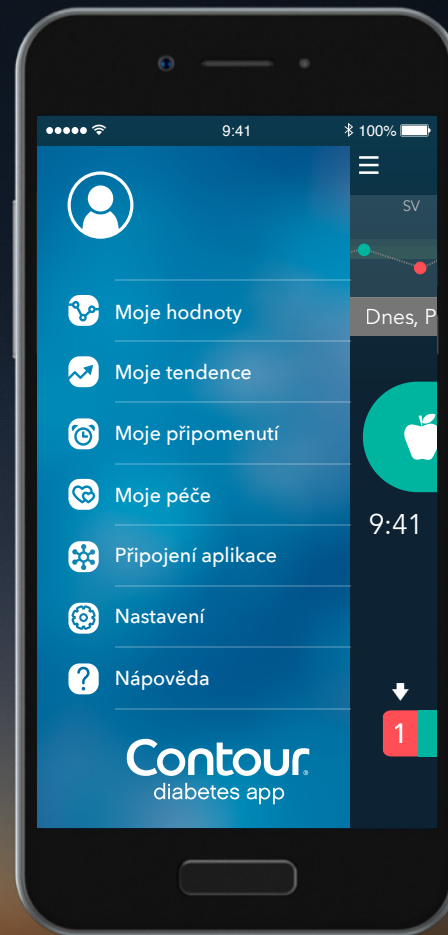

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru


1. **Plán připomenutí testu**
Můžete vybrat z položky **Moje tendence** z **Hlavní nabídky** a poté poklepat na **+**.

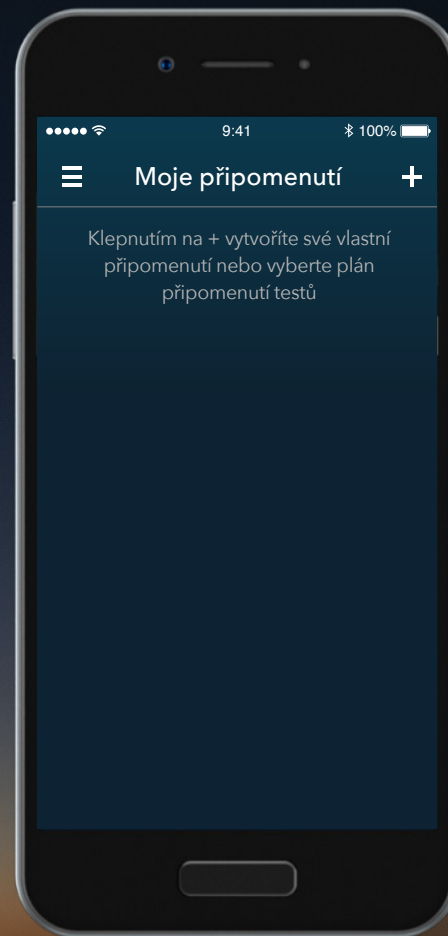

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1. Plán připomenutí testu


Vyberte záložku **Plán připomenutí testu** a vytvořte si plán připomenutí testu.

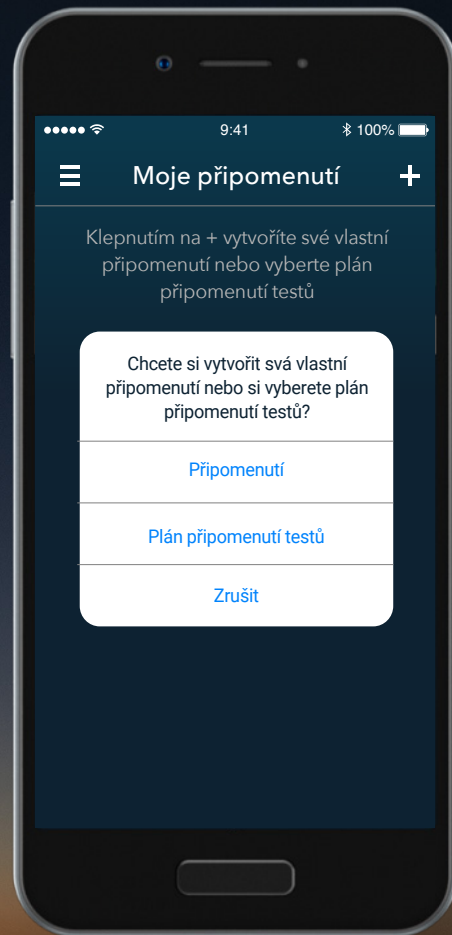

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2. Plán připomenutí testu

Vyberte **Plán připomenutí testu**, se kterým chcete pracovat.

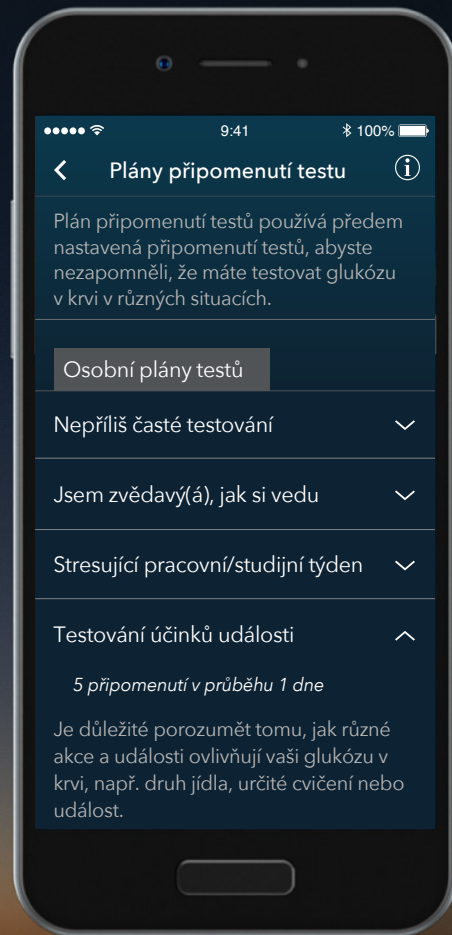


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2. Plán připomenutí testu

Vyberte **Plán připomenutí testu**, se kterým chcete pracovat.

Stisknutím šipky vedle plánu se dozvíte více informací.

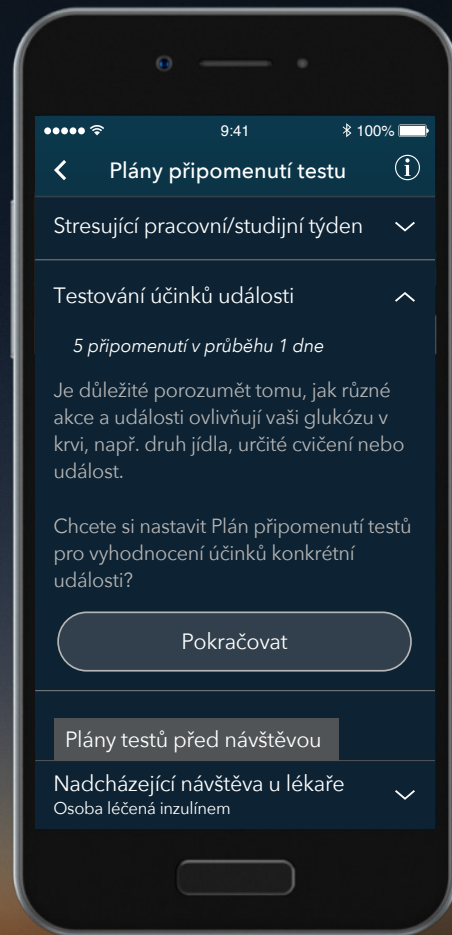


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2. Plán připomenutí testu

Vyberte **Plán připomenutí testu**, se kterým chcete pracovat.

Stisknutím šipky vedle plánu se dozvíte více informací.


Výběrem položky **Pokračovat** můžete nastavit individualizovaný **Plán připomínání testu**.

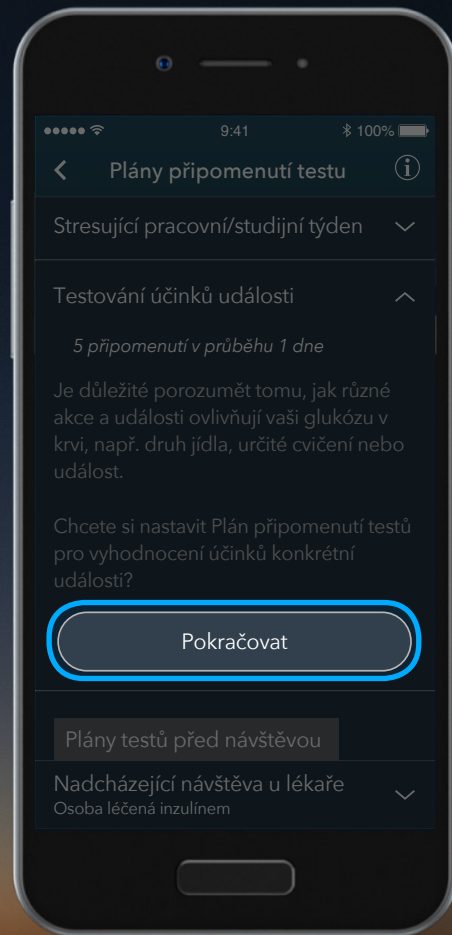

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. Plán připomenutí testu


Poklepáním na datum a tlačítko času vyberete datum a čas události, kterou chcete sledovat.

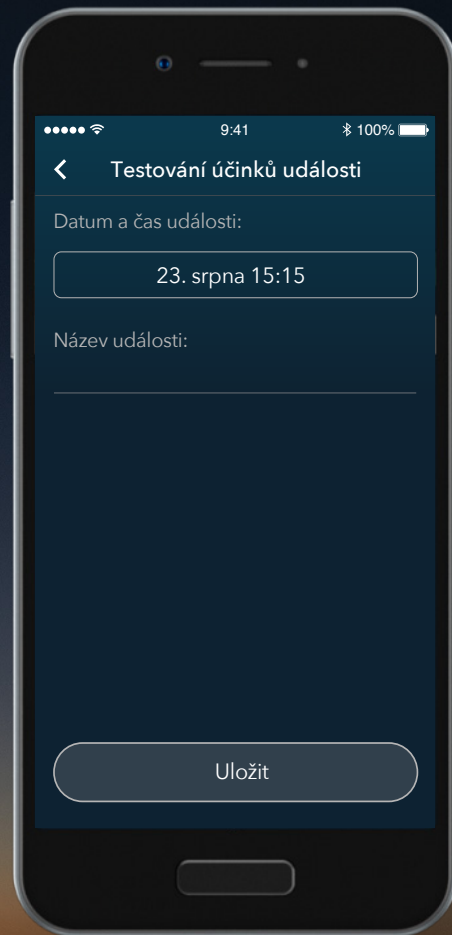

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. Plán připomenutí testu


Poklepáním na datum a tlačítko času vyberete datum a čas události, kterou chcete sledovat.

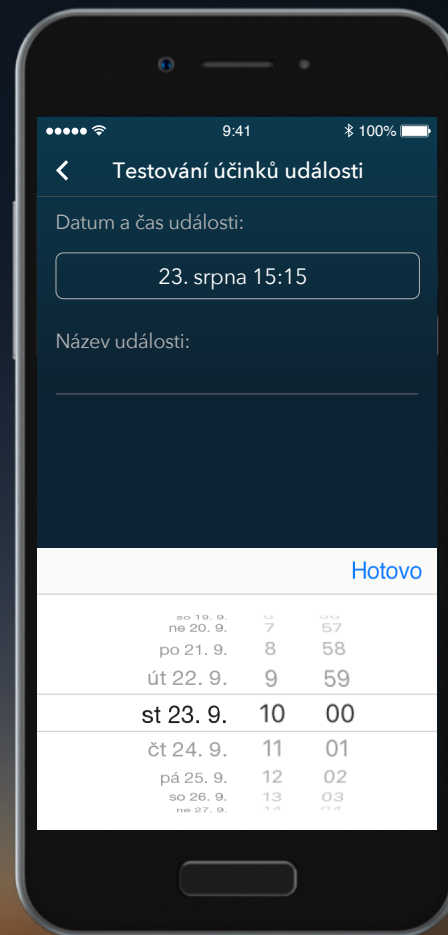

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. Plán připomenutí testu

Poklepáním na oblast s Názvem události se zobrazí klávesnice, na které zadejte událost.

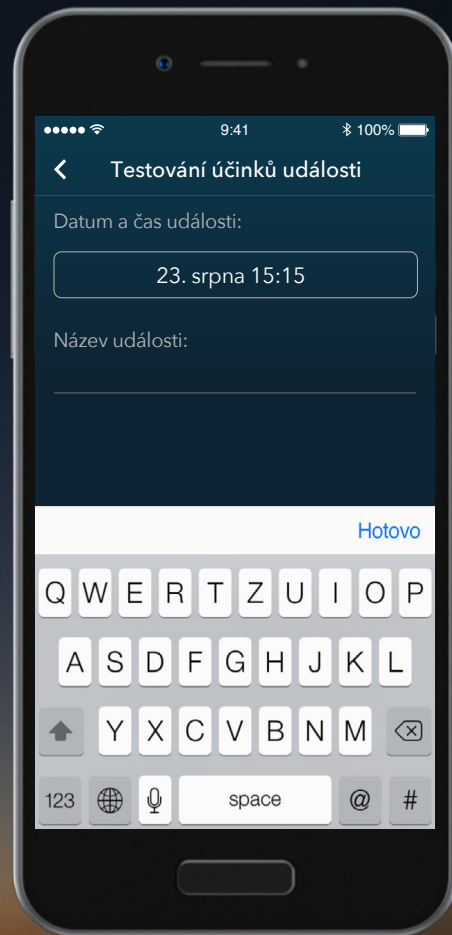

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. Plán připomenutí testu

Stiskněte **Uložit**.

9:41 100%

< Testování účinků události

Datum a čas události:

23. srpna 15:15

Název události:


Uložit

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. Plán připomenutí testu

Stiskněte **Uložit**.

Váš **Plán připomenutí testu** je nyní aktivován.

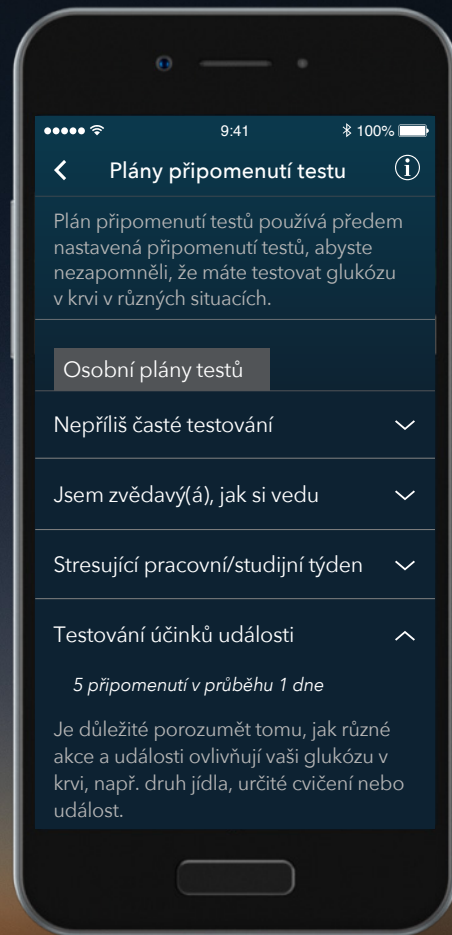

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Pokud máte dotaz ohledně glukometru **CONTOUR®PLUS ONE** nebo aplikace **CONTOUR™DIABETES**, poraďte se svým zdravotním odborníkem a postupujte podle uživatelské příručky.

Více informací o dostupnosti těchto produktů ve vašem státě, naleznete na adrese **diabetes.ascensia.com**.



Hypotetická data pacienta pouze za účelem předvedení. Provedení jakýchkoliv změn léčby, diety nebo cvičení je vždy třeba konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče.



Značka Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Slovní značka a logo Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek je předmětem licence. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Contour jsou ochranné známky popř. registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Datum zpracování: Únor 2018 Kód: G.DC.10.2017.52580



**Contour
plus ONE**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

diabetes.ascensia.com

