




Contour[®] plus ONE[»]

Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Používání funkce **Moje tendence** v aplikaci **CONTOUR™ DIABETES**



Provedení jakýchkoliv změn léčby, diety nebo cvičení je vždy třeba konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče.

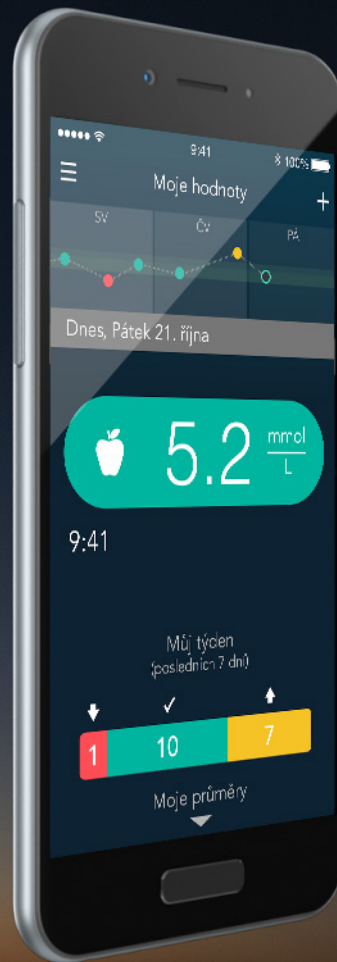


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Funkce **Moje tendence** dokáže identifikovat konkrétní tendence a charakteristiku naměřených hodnot vaší krevní glukózy a informovat vás o jejich možných příčinách.



Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru


Funkce **Moje tendence** dokáže identifikovat konkrétní trendy a tendence v naměřených hodnotách vaší krevní glukózy a informuje vás o jejich možných příčinách.

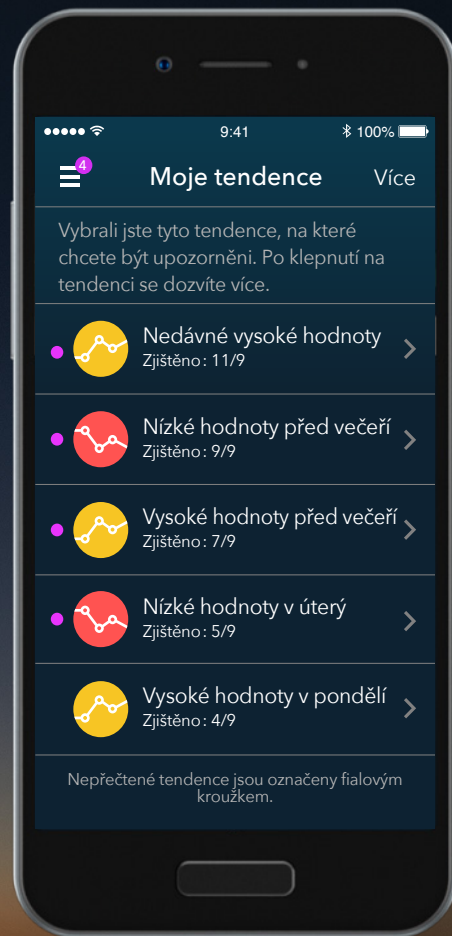

Contour®
plus ONE»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1. **Moje tendence**


Vyberte z Hlavní nabídky Moje tendence

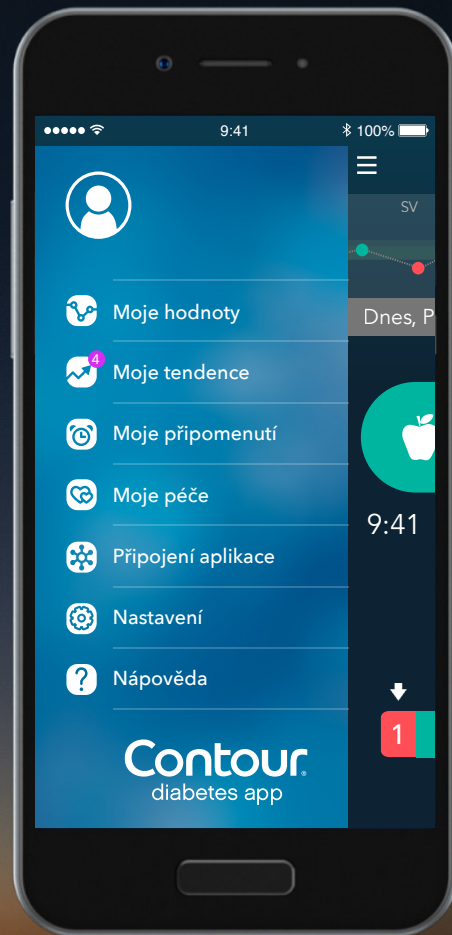

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2. **Moje tendence**


Obrazovka **Moje tendence** ukazuje tendence, na které jste chtěl(a) být upozorňován(a). Nepřečtená tendence je označena fialovým kroužkem.

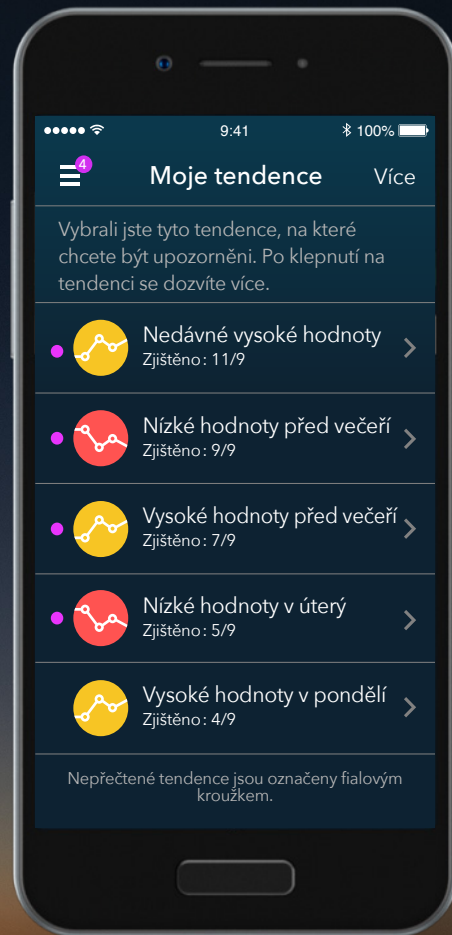

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2. Moje tendence


Poklepáním na **Více** změníte výběr své tendence nebo můžete zkontrolovat historii tendencí.

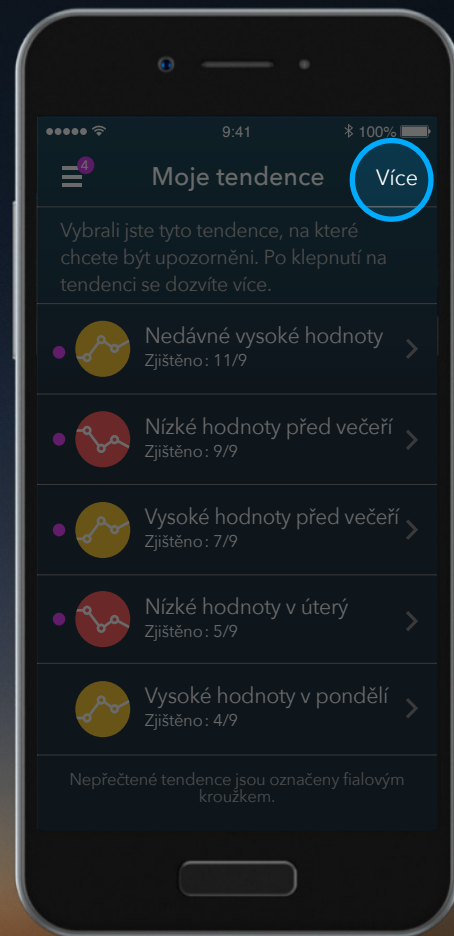

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. **Moje tendence**


Poklepáním na **Výběr tendencí** vyberete, na které tendence chcete být upozorňován(a).

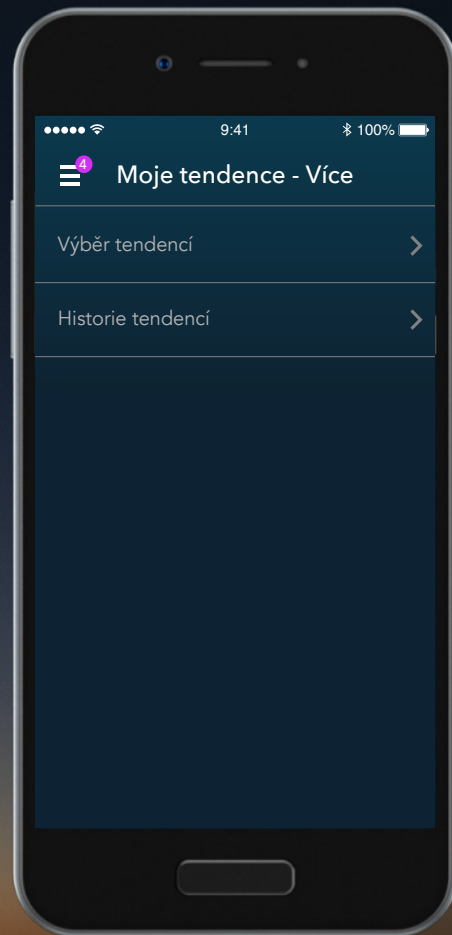

Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. **Moje tendence**


Poklepáním na **Výběr tendencí** vyberete, na které tendence chcete být upozorňován(a).

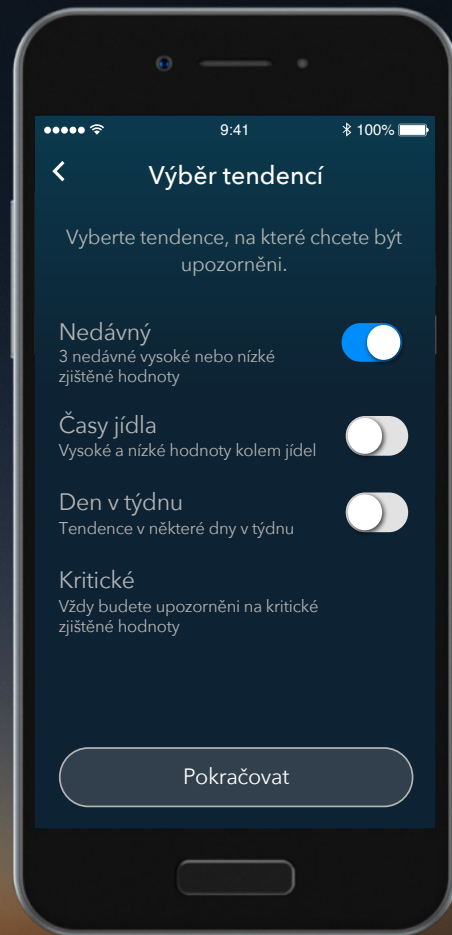

Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. **Moje tendence**

Poklepáním na **Výběr tendencí** vyberete, na které tendence chcete být upozorňován(a).

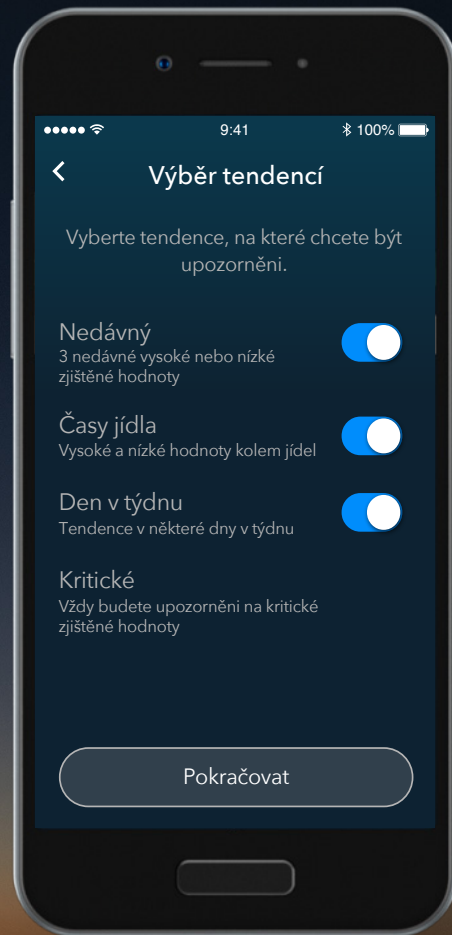


Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4. **Moje tendence**

Všechny tendence, které byly zjištěny, budou uvedeny v sekci **Moje tendence**.


Sekce **Moje tendence** ukazuje tendence, na které jste chtěl(a) být upozorňován(a). Nepřečtená tendence je označena fialovým kroužkem.

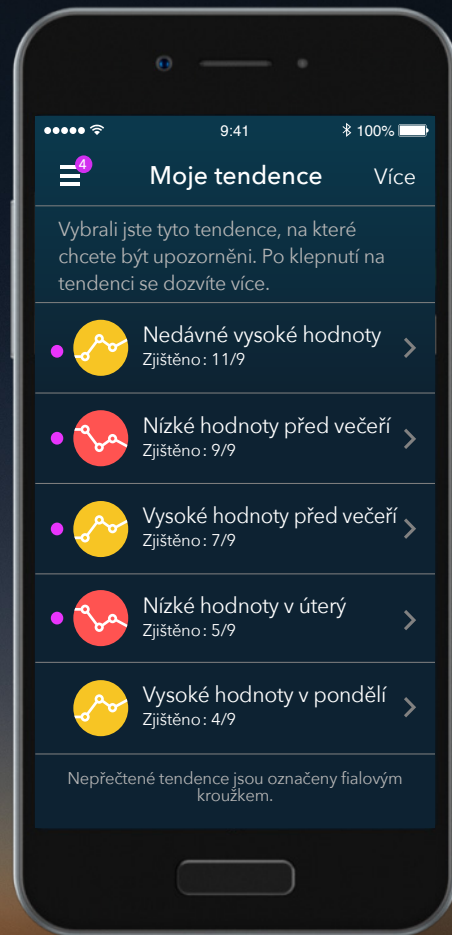

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4. **Moje tendence**


Zde vidíte detaily tendencí a zjistíte více informací o jejich možných příčinách.

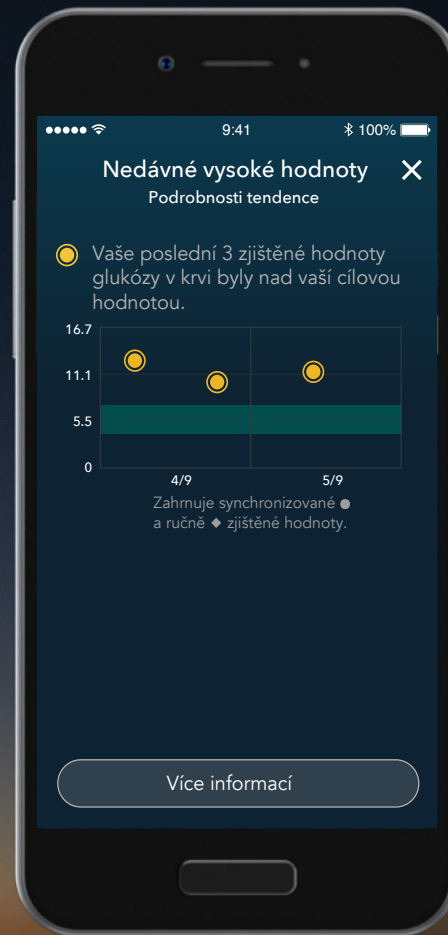

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4. **Moje tendence**


Můžete zjistit více o možných příčinách této tendence a vybírat z několika možných příčin jako např. jídla, medikace nebo aktivity.

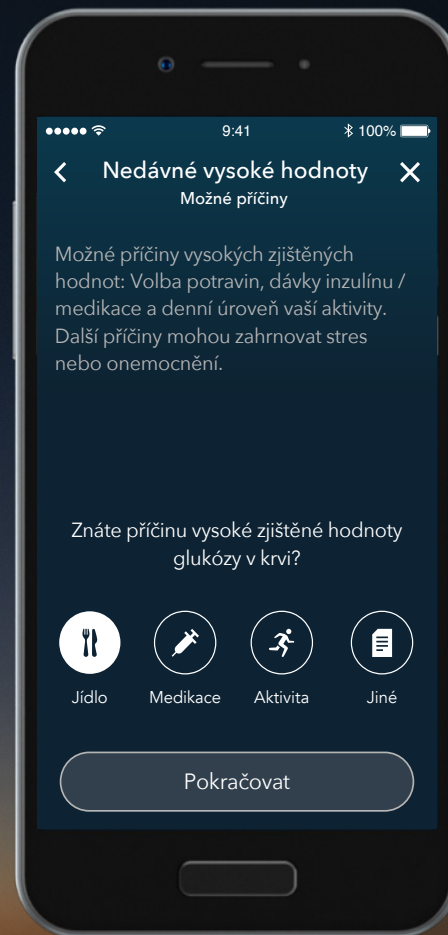

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4. Moje tendence


Můžete rovněž nastavit připomenutí možné příčiny.

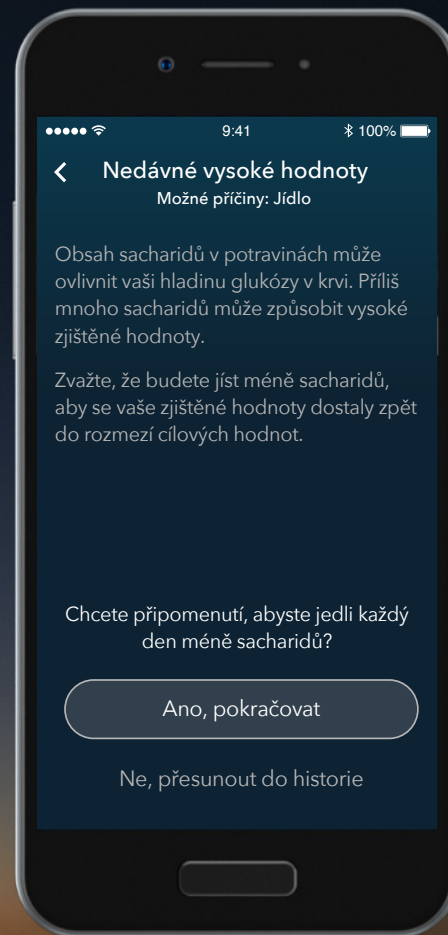

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5. Moje tendence


V **Historii tendencí** se můžete kdykoliv vrátit zpět k tendenci.

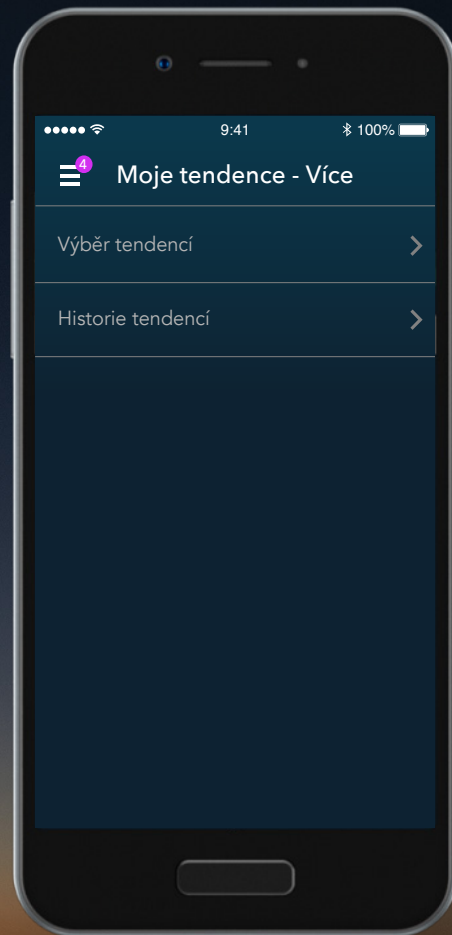

Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5. Moje tendence


V **Historii tendencí** můžete zkontrolovat minulé zjištěné tendence, které již nejsou aktivní.

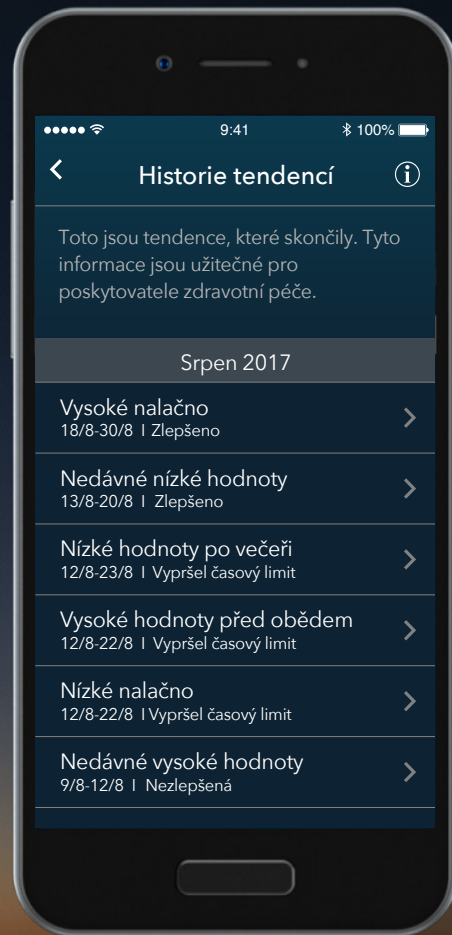

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5. Moje tendence

V **Historii tendencí** můžete zkontrolovat minulé zjištěné tendence, které již nejsou aktivní.

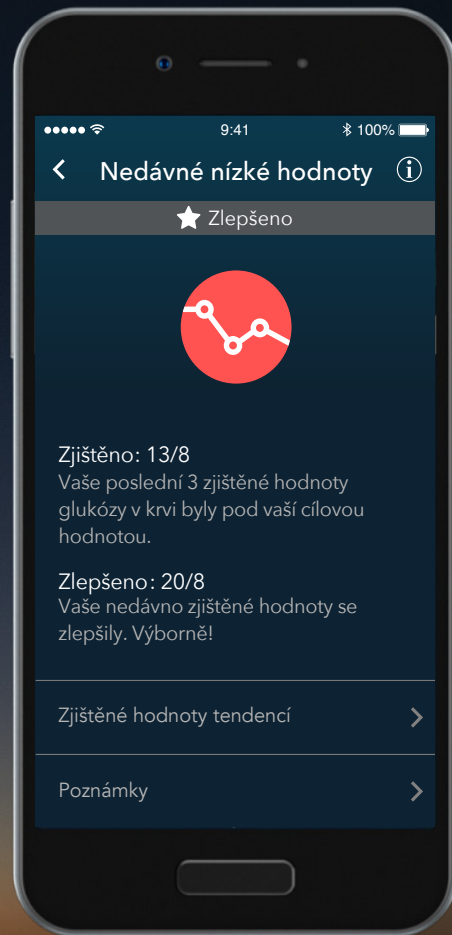

Contour[®]
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Pokud máte dotaz ohledně glukometru **CONTOUR® PLUS ONE** nebo aplikace **CONTOUR™ DIABETES**, poraďte se svým zdravotním odborníkem a postupujte podle uživatelské příručky.

Více informací o dostupnosti těchto produktů ve vašem státě, naleznete na adrese **diabetes.ascensia.com**.



Hypotetická data pacienta pouze za účelem předvedení. Provedení jakýchkoliv změn léčby, diety nebo cvičení je vždy třeba konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče.



Značka Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Slovní značka a logo Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek je předmětem licence. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Contour jsou ochranné známky popř. registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Datum zpracování: Únor 2018 Kód: G.DC.10.2017.52578



**Contour®
plus ONE**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions